



تحذير

المجموعة مزودة بزنبيرك.  
اقرأ الإرشادات بعناية قبل المتابعة.

### تعليمات التجميع

**1-** ضع الوجه العلوي برفق على سطح نظيف وناعم.

**2-** ضع الكتيفة العلوية ومقبض الإعتاق في الأعلى كما هو موضح. وقم بحاذة الفتحات ثم أحكم التثبيت باستخدام (6) مسامير خشبية ملولبة.

**3-** قم بتركيب لوحة التثبيت الخلفية في الكتيفة العلوية لكن بدون إحكام تثبيتها باستخدام مسامير تثبيت مصوملة 3/8 بوصة 16-3 1/4 بوصة.


**4-** أدخل مجموعة العمود بحيث يتجه المسامير الملولبة المستخدم إلى الداخل. كما هو موضح. مهم: يجب أن تلائم النقرات المحروطة البارزة الموجودة على لوحة التثبيت الخلفية والكتيفة العلوية في جزء المزوجة بطرف العمود الخارجي. أحكم ربط المسامير المصوملة باستخدام مفتاح 9/16 بوصة بعزم 18 قدم لكل رطل.

إذا كانت لديك أية مشكلة أو سؤال أو طلب. اتصل بالتاجر المحلي لديك أو بالخط الأول لشركة Steelcase على الخط المجاني **888.STEELCASE** (888.783.3522) للحصول على استجابة فورية من الأشخاص الراغبين في مساعدتك.


(خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وبورتوريكو وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. يرجى الاتصال على الرقم: 1.616.247.2500) أو زيارة موقعنا الإلكتروني: [www.steelcase.com](http://www.steelcase.com)

© جميع الحقوق لعام 2008 محفوظة لشركة Steelcase Inc.  
جراند رابيدز، ميتشجن 49501  
الولايات المتحدة الأمريكية



طُبِعَ في الولايات المتحدة الأمريكية

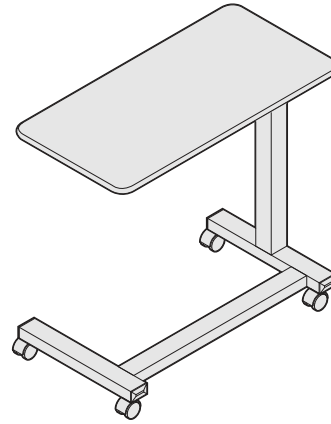


طاولة متحركة فوق السرير  
بقاعدة على شكل حرف C  
(موضحة في هذه الإرشادات)

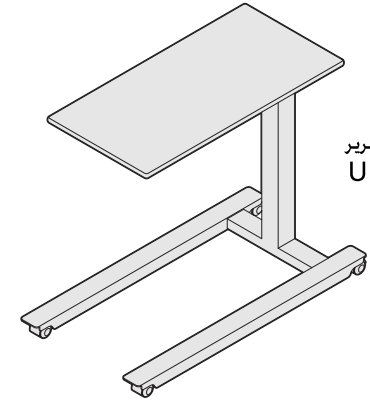

طاولة متحركة فوق السرير  
بقاعدة على شكل حرف U

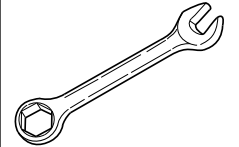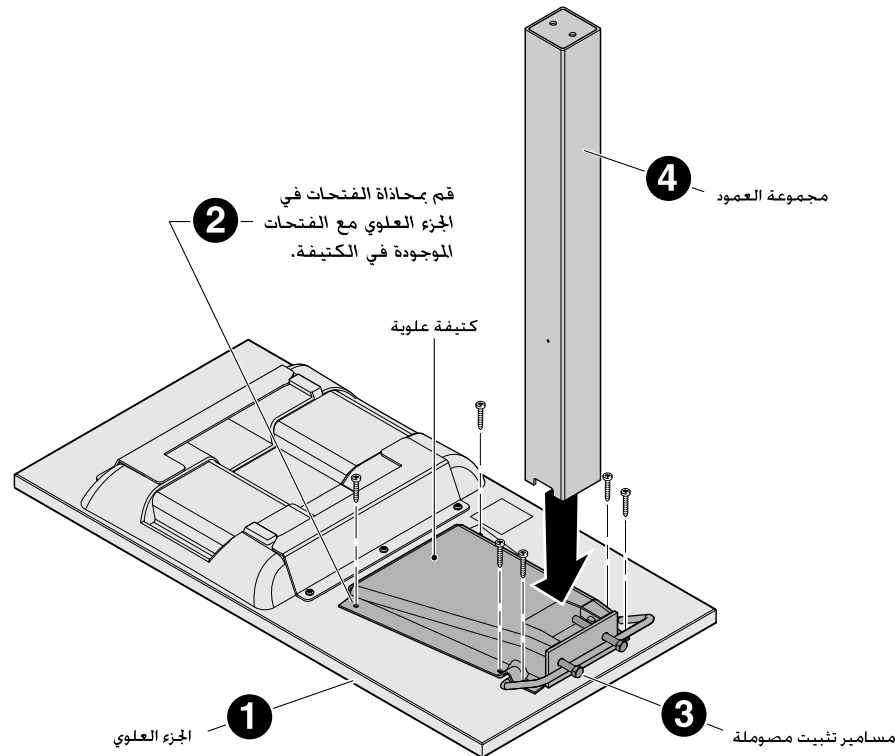

مفتاح 9/16 بوصة

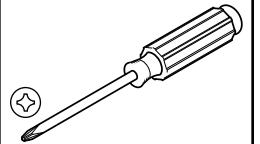

**-5** قم بتركيب (4) عجلات صغيرة بعناية في مجموعة القاعدة.

**-6** أدخل مسمارين (2) مصوملين عبر لوحة المسامير المصوملة. ثم عبر مجموعة القاعدة كما هو موضح. قم بمحاذاة المسامير المصوملة مع الفتحات في الجزء السفلي من العمود الداخلي وأحكام ربطها باستخدام مفتاح 9/16 بوصة بعزم 18 قدم لكل رطل.



**-7** ضع الطاولة الكاملة في الوضع القائم على العجلات.

**-8** قم بتركيب سداتين (2) للفتحتين في قائمة القاعدة المقابلة للعمود.

**-9** أزل مسامير الشحن الملولبة وتخلص منها.

### تعليمات التشغيل

**-1** لرفع أو خفض الجزء العلوي. اضغط على ذراع الإعتاق إلى أعلى لتحرير القفل واضبط الجزء العلوي على الوضع المطلوب.

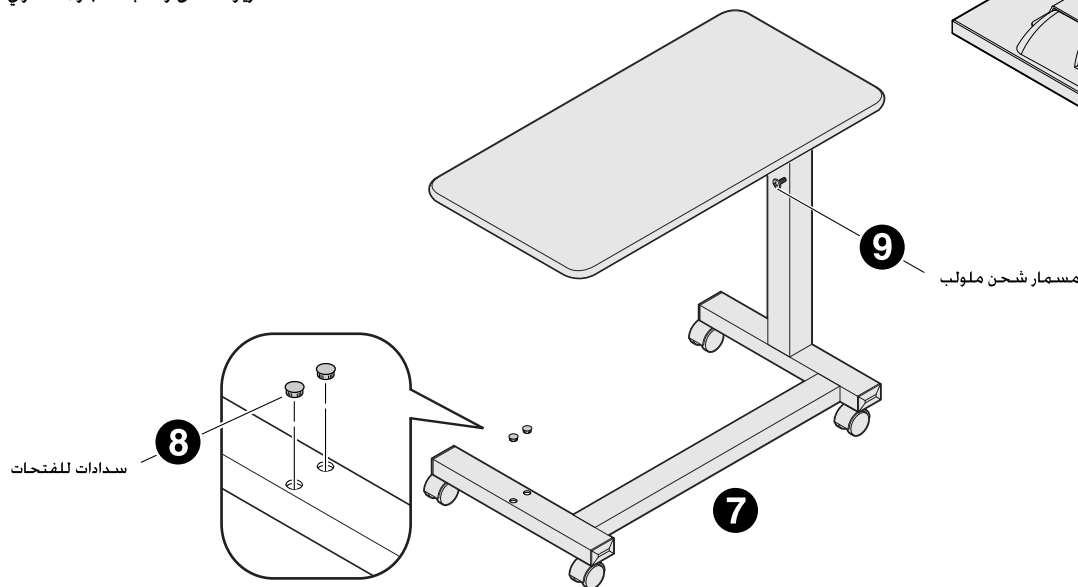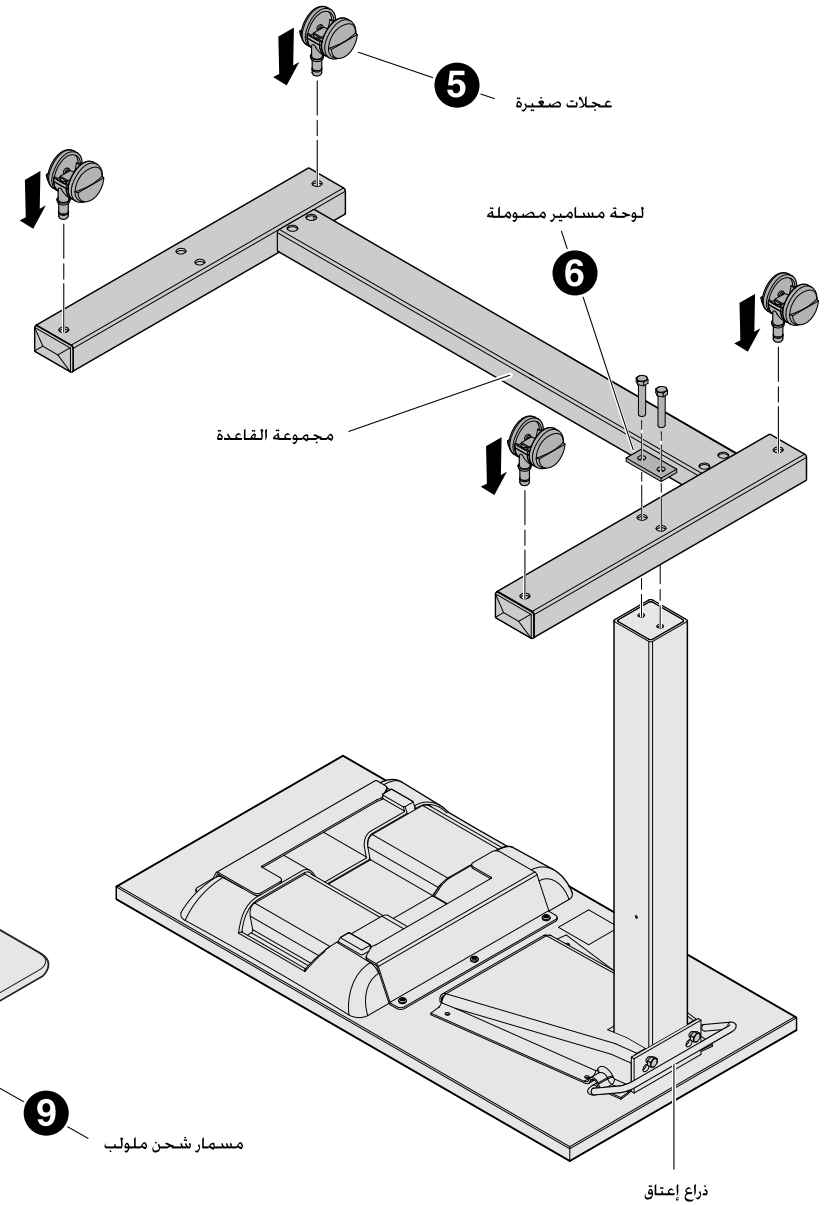

### تعليمات لجميع لوحة اختيارية للزينة

- 1-** أدخل لسان المرآة في الفتحة على اللوحة كما هو موضح.
- 2-** قم بثني المرآة وأدخل لسان المرآة المقابل في الفتحة المقابلة باللوحة.
- 3-** كرر الخطوتين 1 و2 مع المرآة الأخرى.
- 4-** ضع لوحة الزينة مقلوبة رأساً على عقب على الجانب السفلي من جزئها العلوي.
- 5-** قم بمحاذاة الفتحات في دليلي لوحة الزينة مع الفتحات الدليلية في الجزء العلوي.
- 6-** أحكم تثبيت دليلي لوحة الزينة على سطح العمل باستخدام مسامير خشبية ملولبة. (6)

